

OraScreen® V

Jednorázový, rychlý, kvalitní ústní test pro zjištění:
Cannabinoidu (THC), Opia, Kokainu, Metamfetaminu a Amphetaminu ze slin.
Určeno pro sebetestování

NÁVOD K POUŽITÍ TESTU

PRINCIP ZKOUŠKY

Drogový test OraScreen® IV je určen pro detekci drog v lidském organismu. Test zjišťuje přítomnost/nepřítomnost 5 skupin drog. Veškeré součástky potřebné k testu jsou zabaleny v plastovém zařízení. Princip zkoušky spočívá v dostatečném nahromadění slin a aktivním vytíráním ústní dutiny pomocí tohoto testu. Sliny jsou sbírány pomocí sběrné tyčinky, která je obalena plastovými závity. Odebraný vzorek je poté soustředěn do chromatografické membrány. V případě, že je vzorek negativní, zbarví se testovací linie do růžova. **Jestliže se některá z linií příslušné skupiny drog nezbarví, znamená to, že je test pozitivní.**

UPOZORNĚNÍ

1. Test je určen na jedno použití.
2. Pokud bylo foliové pouzdro nějak protrženo nebo jinak poškozeno, neměl by být test použit.
3. Neprovádějte zkoušku po době platnosti uvedeného na obalu.
4. Otevřete zapečetěné pouzdro a test ihned použijte. Zdlouhavá doba před použitím může způsobit poškození výrobku.
5. Aby se výsledky dobře zobrazily, umístěte test na vodorovný povrch.
6. Dokud probíhá test, nedotýkejte se zařízení.
7. Test si přečtěte vždy v adekvátním osvětlení.

SKLADOVÁNÍ

1. Komponenty tohoto testu jsou stabilní do data spotřeby uvedeného na obalu, pokud jsou skladovány v rozmezí 2^o – 30 °C.
2. Nedovolte, aby byl tento výrobek vystaven extrémním teplotám jako je mráz (<0^oC) nebo teplotám nad 30^oC.

Varování: Vzorky slin a veškeré materiály, které s nimi přišly do styku, mohou být nakaženy jakoukoliv infekcí, a ta se může dále šířit. Doporučujeme použít jednorázové rukavice. (Nejsou součástí balení).

POTŘEBNÉ MATERIÁLY

Každé foliové pouzdro obsahuje:

1. Jeden OraScreen® V test
2. Sušivo

Materiály, které mohou být potřebné, ale nejsou poskytovány:

1. Stopky
2. Jednoúčelové rukavice

ODBĚR VZORKU A MANIPULACE

Vzorky slin jsou odebírány přímo pomocí tohoto výrobku. Pro běžnou aplikaci, nesbírejte vzorky jinými způsoby. Nepoužívejte zastaralé vzorky slin. Mohlo by to vést k rozdílným výsledkům testu oproti čerstvému vzorku slin. Odběr vzorku slin nepotřebuje žádné další speciální úpravy, ale před odběrem by neměli v ústech zůstat žádné hrubé ani částičky jídla, ovoce ani šňáv.


Důležité informace:

1. Jestliže je test skladován v chladném prostředí, přineste jej do místnosti, kde je optimální pokojová teplota.


2. **Osoba, která je testována musí být schopna vyprodukovat dostatečné množství slin, aby byl test proveden řádně.** Napěněné vzorky a vzduchové bubliny nejenže redukuje objem vzorku potřebný pro test, ale také mohou zabránit kapilárnímu toku v absorpčním materiálu.
3. Ujistěte se, že testovaná osoba neměla posledních 5 minut nic v ústech jako např. jídlo, žvýkačku, tabákové výrobky atd. Poté můžete provést test.

Poznámka: Jestliže má testovaná osoba pocit, že má dost sucho v ústech na to, aby byla schopna vyprodukovat optimální množství slin, dejte jí napít vody, bonbon nebo žvýkačku bez cukru, počkejte 5 minut a potom proveďte test.


POSTUP TESTU

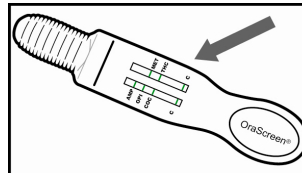


1. Vyjměte test z pouzdra. Ověřte, zda je zobrazeno všech 7 zelených linií v testovacím poli. Pokud není zobrazeno všech 7 linií, použijte nový test.

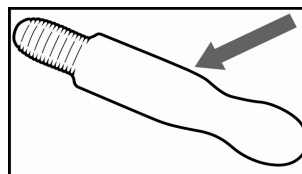

2. Označte test testovanou osobou (ID) nebo číslem.

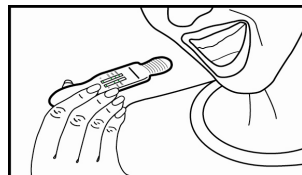

3. V ústech shromážděte dostatečné množství slin. Poté vložte konec testu pomocí sběrné tyčinky, která je obalena plastovými závity do úst a aktivně s ní vytírejte dutinu ústní a jemně stiskujte jazykem. Takto provádějte po dobu **alespoň 2 minut. Jakmile uvidíte, že sliny prosakují jedním testovacím proužkem, vyndejte test z úst.**

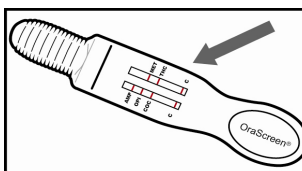

4. Test umístěte na bezpečný, rovný povrch a nechte jej vyhodnotit. Trvá to zhruba 10-12 minut.

5. Výsledek testu můžete přečíst v testovacím poli za 10 – 12 minut. Zkontrolujte, zda se zbarvily kontrolní linie (C).

ANALÝZA VÝSLEDKU

Pozitivní výsledek: V testovacím poli pro danou drogu se **neobjeví** růžová linie. Objeví se pouze kontrolní linie „C“.

Negativní výsledek: V testovacím poli pro danou drogu se **objeví** růžová linie. Taktéž se objeví kontrolní linie „C“.

Linie „C“: Tyto linie slouží jako kontrola správného provedení testu. **Musí se zobrazit i při pozitivním i při negativním výsledku testu.** Pokud se nezobrazí, test je neplatný a musí se provést znovu použitím nového testu.

Níže jsou uvedeny příklady možných výsledků (více variant je možných):

1. Před provedením testu jsou všechny linie zbarvené zeleně.



2. NEGATIVNÍ výsledky testu všech pěti skupin drog (THC, COC, OPI, MET, AMP) jsou indikovány přítomností všemi pěti růžovými liniemi.



3. POZITIVNÍ pro OPI a THC, NEGATIVNÍ pro AMP, COC a MET.



4. Neplatný test. Jedna kontrolní linie „C“ se nezbarvila.



!POZOR! Na intenzitě zbarvení jednotlivých linií nezáleží. Mohou být zbarveny od temně fialové až po velmi světle růžovou. Důležitý je alespoň barevný náznak linií v tomto odstínu.

Tabulka pro určení pozitivní hranice drogy

THC – Cannabinoidy (Marihuana, Hašiš, Pot)	50 ng/mL
COC – Kokain (Crack, Coke)	50 ng/mL
MET – Methamphetamin (Speed, Crank, Extáze)	50 ng/mL
AMP - Amphetamin	50ng/mL
OPI – Opiáty (Heroin, Morfium, Codein)	50ng/mL

Test je pozitivní, když výsledek dosáhne stejné nebo vyšší hranice drogy.

Výrobce:

Sun Biomedical Laboratories, Inc.
604 VPR Center, 1001 Lower Landing Road
Blackwood, NJ 08012 USA

Zplnomocněný zástupce:

BDS INTERNATIONAL Diagnostics GmbH
Friedrichstr. 36
68723 Schweitzingen, Germany

Distributor:

V - NET s.r.o.
Šumice 139
687 31 Šumice
Tel:572 639 076

www.v-net.cz



Catalog No: 16-7001

